

# ALVIC<sup>®</sup> complete Transponder

## FDX-B Transponder-Komplettsystem zur elektronischen Tierkennzeichnung Für Hunde und Katzen

### • Produktinformation

Die steril verpackte ALVIC<sup>®</sup> complete besteht aus einer Kanüle mit Luer-Lock-Ansatz und innenliegendem FDX-B Transponder sowie einem für die Implantation erforderlichen Injektor als Komplettsystem. Jede sterile ALVIC<sup>®</sup> complete-Kompletteinheit enthält 8 Selbstklebe-Etiketten, die die Transpondernummer als Zahl und Barcode anzeigen. Die Länge der Kanüle beträgt 25 mm. Der für das Platzieren des Transponders im Tierkörper wichtige Mandrin ist mit dem Konus des Injektors fest verbunden. Der Transponder besteht aus einem Mikrochip, der eine weltweit einmalige Codenummer (=Transpondernummer) enthält, und einer Antennenspule, eingebettet in einer Reiskorngroßen (12 x 2,1 mm) Glashülle aus gewebeverträglichem Bioglas.


Der Transponder im ALVIC complete entspricht der ISO-Norm 11784 sowie Anhang A der ISO-Norm 11785. Die 15-stelligen Transpondernummern beginnen mit der Deutschlandkennung „276“ entsprechend ISO 3166.

Für die eigentliche Implantation des Transponders in das Tier wird kein zusätzliches Hilfsmittel benötigt.

### • Anwendung

Vor der Implantation sollten die Unversehrtheit der Verpackung sowie die Funktion des Transponders (letztere mit einem ISO-konformen Lesegerät) überprüft werden. Gleichzeitig empfiehlt sich ein Abgleich mit den beigefügten Barcode-Etiketten.

Nach dem Entfernen der Schutzkappe die Kanüle ggf. fest aufdrehen und dann den Transponder unter aseptischen Bedingungen in das Tier applizieren. Nach der Implantation sind Sitz und Funktion des Transponders mit einem ISO-konformen Lesegerät zu überprüfen.

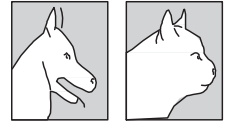

### • Hinweis

In äußerst seltenen Fällen kann infolge von Haarrissen in der Glashülle die Funktion eines Mikrochips nach dem Implantieren eingeschränkt sein. Deshalb empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung der Lesbarkeit insbesondere vor Auslandsreisen.

Bei kleineren Tieren können Röntgenaufnahmen das Auffinden von einem sehr selten auftretenden „wandernden“ Transponder erleichtern.

### • Handelsform

Packung mit 20 Transponder-Kompletteinheiten

*Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.*

### AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

